

Achten Sie auch beim Entsorgen von Pen-Kanülen auf Ihre Sicherheit!

Benutzen Sie immer eine Kanülen-Entsorgungsbox mit Abdrehvorrichtung.




**SCHWARZ**  
PFLEGESYSTEME

**melijekt**<sup>®</sup>

Art.-Nr. 01492000

## Sichere Entsorgung von Pen-Kanülen


## Anwendungshinweis

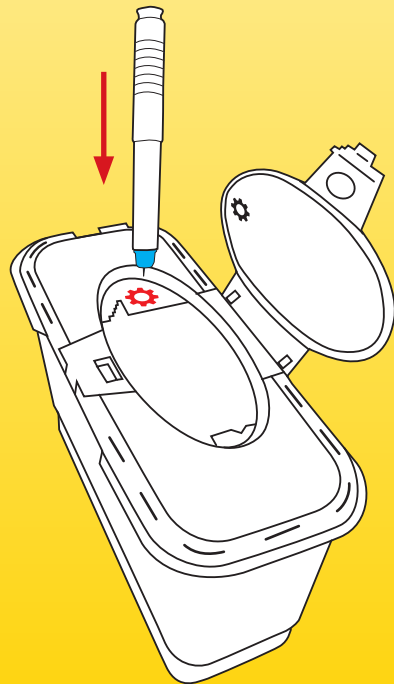

1

### Festklemmen ...


Zum sicheren Entsorgen den Pen in die sternförmige Aussparung im Deckel stecken. Die Kanüle muss darin fest eingeklemmt sein.

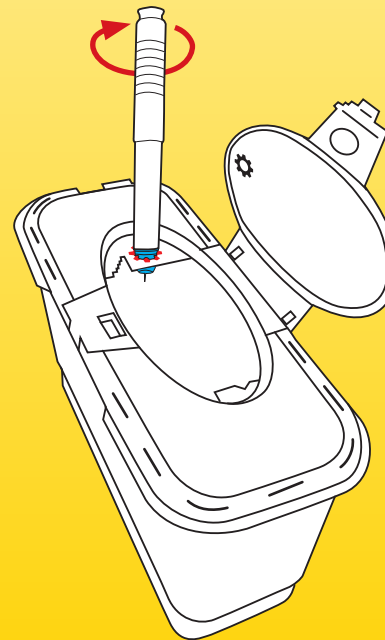

2

### Abdrehen ...

Den Pen einige Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Kanüle vom Schaft zu lösen. (Falls Pen nicht festklemmt beim Drehen leicht zur Seite neigen)

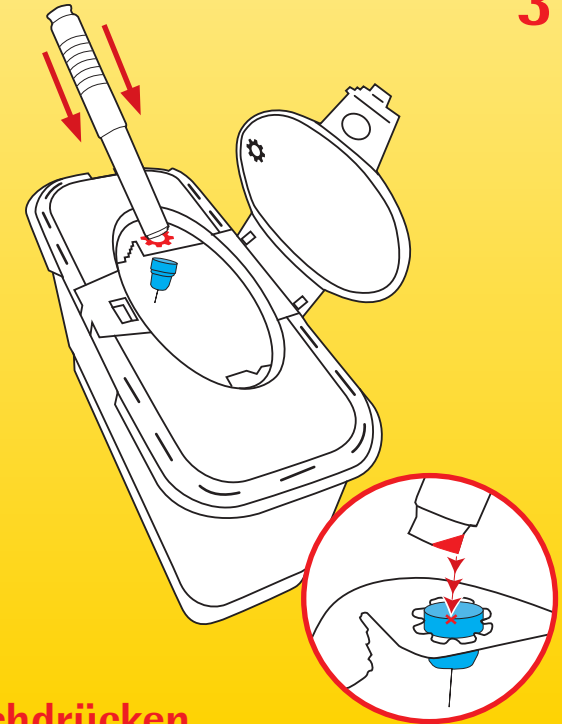

3

### Durchdrücken ...

Mit dem Schaft des Pens **kraftvoll** auf den Rand der Kanüle drücken. Die Kanüle fällt zur sicheren Verwertung in die Box.

11/2020 – Änderungen vorbehalten

Achten Sie auch beim Entsorgen von Pen-Kanülen auf Ihre Sicherheit!

Benutzen Sie immer eine Kanülen-Entsorgungsbox mit Abdrehvorrichtung.




**SCHWARZ**  
PFLEGESYSTEME

**melijekt**<sup>®</sup>

Art.-Nr. 01490401


## Sichere Entsorgung von Pen-Kanülen

## Anwendungshinweis

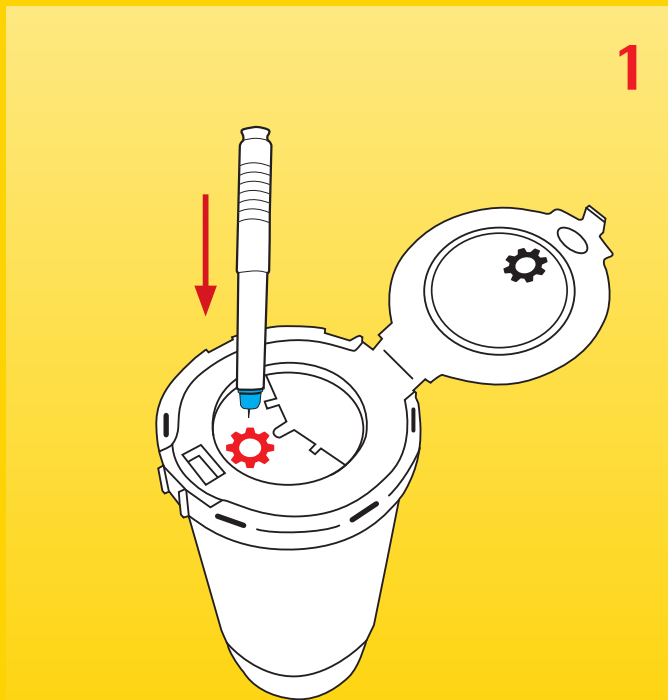


### Festklemmen ...

Zum sicheren Entsorgen den Pen in die sternförmige Aussparung im Deckel stecken. Die Kanüle muss darin fest eingeklemmt sein.

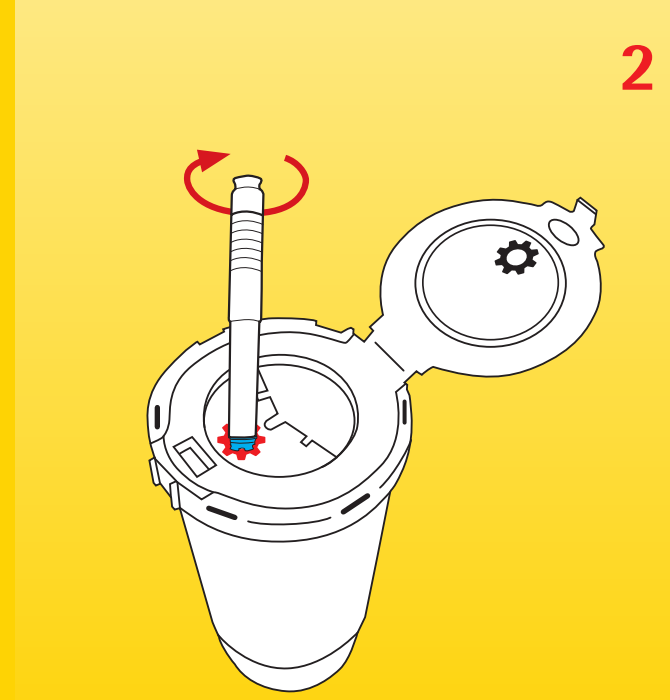

### Abdrehen ...

Den Pen einige Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Kanüle vom Schaft zu lösen. (Falls Pen nicht festklemmt beim Drehen leicht zur Seite neigen)

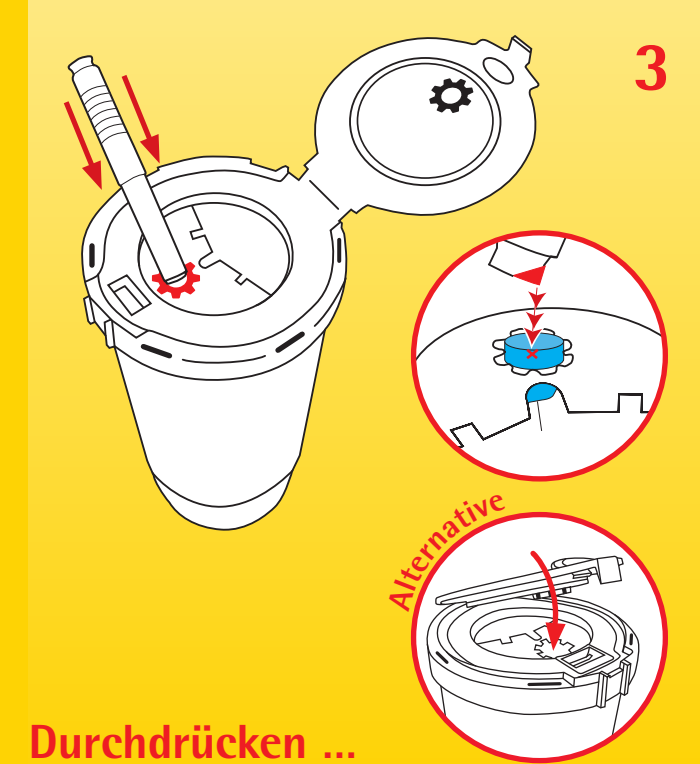

### Durchdrücken ...

Mit dem Schaft des Pens **kraftvoll** auf den Rand der Kanüle drücken. Die Kanüle fällt zur sicheren Verwahrung in die Box.

### Alternative:

Mit der Durchdrückhilfe am Deckel **kräftig** auf die Kanüle drücken. Die Kanüle fällt in die Box.

11/2020 – Änderungen vorbehalten