

melipul® Tabletten-Mörser und Tabletten-Teiler

Dieses innovative Kombiprodukt vereint die Funktionalität eines Tabletten-Mörser und Tabletten-Teilers in einem kompakten und praktischen Design. Es ist die ideale Lösung für alle, die regelmäßig Tabletten zerteilen oder mörsern müssen. Mit seinen kompakten Abmessungen passt es bequem in jede Tasche und ist somit perfekt für den täglichen Gebrauch geeignet.

Die robuste Konstruktion aus schlagfestem Material gewährleistet eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Ob in der stationären oder ambulanten Pflege, zu Hause oder unterwegs, dieses Kombiprodukt ist immer ein treuer Begleiter. Dank seiner spülmaschinengeeigneten Eigenschaften ist es zudem äußerst pflegeleicht.

Das Gerät ist so konzipiert, dass Tabletten einfach geteilt werden können. Der integrierte Mörser ermöglicht es, Tabletten mühelos zu einem feinen Pulver zu zermahlen, ideal für Personen mit Schluckbeschwerden oder zur feinen Dosierung.



Tabletten mörsern



Tabletten teilen

SCHWARZ
P F L E G E S Y S T E M E

SCHWARZ Pflegesysteme

Helmut Schwarz GmbH
Rengers 6 | 88316 Isny
Telefon 07562 9755020
info@schwarz-pflegesysteme.de

www.schwarz-pflegesysteme.de

melipul®

SCHWARZ
P F L E G E S Y S T E M E

Tabletten-Mörser und Tabletten-Teiler

Gebrauchsanleitung



01/2024

www.schwarz-pflegesysteme.de

Gebrauchsanleitung zum Tabletten-Mörser und Tabletten-Teiler

Hinweis:

Bei Medikamenten, die weder zerteilt noch pulverisiert werden sollen, empfehlen wir mit Ihrem Arzt oder Apotheke abzuklären, ob der Tabletten-Mörser und Tabletten-Teiler angewendet werden darf.

Der spülmaschinenfeste Tabletten-Mörser und Tabletten-Teiler ist nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Der Mörser eignet sich nicht für retard und magenresistente Medikamente.

Achtung: Bei unsachgemäßer Bedienung besteht Verletzungsgefahr, die Klinge aus chirurgischem Edelstahl ist sehr scharf!

Eigenschaften:

Material	Polycarbonat
Gewicht	43 g
Maße	63 x 50 x 41 mm
Temperaturbeständigkeit	93°C
Artikelnummer	01376000



1. Tabletten-Mörser öffnen

Halten Sie den Mörser an den geriffelten Flächen fest und schrauben Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf.



2. Tablette einlegen und pulverisieren

Legen Sie die Tablette in den unteren Teil ein und schrauben Sie beide Teile zusammen, bis diese spürbar Kontakt bekommen. Drehen Sie dann beide Hälften hin und her um die Tablette zu zerkleinern.



3. Pulver entnehmen

Schrauben Sie beide Teile auseinander und entnehmen Sie das Tablettenpulver.



1. Tabletten-Teiler öffnen

Klappen Sie den Deckel des Teilers zur Verwendung nach oben, achten Sie dabei auf die scharfe Klinge.



2. Tablette einlegen und teilen

Legen Sie die Tablette wie abgebildet in den Teiler ein um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Drücken Sie den geöffneten Deckel auf das Unterteil.



3. Tablette entnehmen

Öffnen Sie den Teiler und entnehmen Sie die Tablettenhälften.